

INSTRUÇÃO DE USO – 11173P

20 Litros

REATON LRP.

Nome do produto

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de epi.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos hematológicos Pentra 60/80 e 120.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros diluentes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com os Hemolisantes Realise 3-LRP, BA-60/80, BA-120 e 5 EO e o detergente Reageclean LR-P nos equipamentos indicados no tópico "Descrição".

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização. A qualidade dos reativos é assegurada até a data de validade mencionada em sua embalagem desde que seguida à instrução de uso.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório. ANVISA RDC N° 222/2018.

FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro".
Solução eletrolítica balanceada utilizada como na contagem diferencial, determinação e distribuição de células sanguíneas.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMISSÃO/REVISÃO

EMISSÃO: 08/09/2021

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo