

INSTRUÇÃO DE USO – 21630UR

20 Litros

VIXSHEATH VET.

Nome do produto

FINALIDADE:

Uso em diagnostico "in vitro".
Solução livre de cianeto para
uso em analisadores
hematológicos.

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de EPI.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos hematológicos Urit 5 partes veterinário.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros hemolisantes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com o Detergente Vixclean Vet, o Hemolisante Vixlise Vet e o Diluente Vixton Vet nos equipamentos indicados no tópico "Descrição".

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização. A qualidade dos reativos é assegurada até a data de validade mencionada em sua embalagem desde que seguida à instrução de uso.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório. Ver ANVISA RDC N° 222/2018.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMISSÃO/REVISÃO

EMISSÃO: 13/09/2021

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo