

# INSTRUÇÃO DE USO – 24105SY

80 mL

## VIXCLAIR HIPO VET.

Nome do produto

## FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro". Solução de limpeza e branqueamento para equipamentos de hematologia.

## INSTRUÇÃO

**MODO DE USO:** Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

**USUÁRIO PRETENDIDO:** Uso laboratorial por pessoal técnico.

**ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:** Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de EPI.

**DESCRIÇÃO:** PRODUTO CORROSIVO. Este produto deve ser utilizado somente em analisadores hematológicos.

**ESTABILIDADE EM USO:** A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

**INTERFERÊNCIA:** Não misturar com outros detergentes durante o uso.

**COMPOSIÇÃO:** HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% A 13%. CLORETO ATIVO. PH entre 11,5 a 12,8.

**PRECAUÇÕES DE MANUSEIO:** Evitar o contato com os olhos, pele e roupa. Ao manusear o produto, usar luvas. Manter o frasco fechado quando não estiver sendo utilizado.

**GARANTIA DA QUALIDADE:** Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização. A qualidade dos reativos é assegurada até a data de validade mencionada em sua embalagem desde que seguida a instrução de uso.

**DESCARTE:** De acordo com as normas do laboratório. Ver ANVISA RDC N° 222/2018.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

## EMISSÃO/REVISÃO

**EMISSÃO:** 08/09/2021

**REVISÃO:** 01

## RASTREAMENTO

**FR:** 6.1.12

**Aplicação:** P&D

**Vigência:** Set/2026

**Revisão:** 01

**Elaboração:** Samuel L. A. Barbosa

**Revisor:** Honório Augusto Reis Armond

**Aprovação:** Marcelo César Figueiredo