

INSTRUÇÃO DE USO – 25115UR

80 mL

VIXCLAIR HIPO VET.

Nome do produto

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de EPI.

DESCRIÇÃO: PRODUTO CORROSIVO. Este produto deve ser utilizado somente em analisadores hematológicos.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros detergentes durante o uso.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% A 13%. CLORETO ATIVO. PH entre 11,5 a 12,8.

PRECAUÇÕES DE MANUSEIO: Evitar o contato com os olhos, pele e roupa. Ao manusear o produto, usar luvas. Manter o frasco fechado quando não estiver sendo utilizado.

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização. A qualidade dos reativos é assegurada até a data de validade mencionada em sua embalagem desde que seguida a instrução de uso.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório. Ver ANVISA RDC N° 222/2018.

FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro". Solução de limpeza e branqueamento para equipamentos de hematologia.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMISSÃO/REVISÃO

EMISSÃO: 08/09/2021

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo